

Basilic Ortho Pedia

Basilic Ortho Pedia

Lombacross noir 26 cm de haut

LOMBACROSS NOIR

Caractéristiques

- # Découpe anatomique, convient en particulier pour les femmes
- # Tissu Combitex élastique et aéro
- # Combinaison de velours et mousse dans la partie dorsale
- # 4 baleines lombaires rigides
- # 2 baleines abdominales
- # Passe main

Indication

Modes d'action

- • • * Contention de l'abdomen, augmentant la pression intra abdominale
- • • * Contrôle des mouvements latéraux et de la rotation
- • • * Décharge des muscles dorsaux
- • • * Contrôle de la position du bassin
- • • * %chauffement

Posologie

À titre thérapeutique dans les indications mentionnées, et à titre prophylactique en cas de récurrence, dans la vie quotidienne et professionnelle et pour la pratique du sport.

Mise en place

- • • * Posez la ceinture sur le corps, l'étiquette vers le haut et contre la peau.
- • • * Maintenez l'extrémité de gauche à plat avec la main gauche.
- • • * À l'aide de la boucle, fermez les autos agrippants antérieurs et réglez le soutien lombaire souhaité.

Suivez les instructions du médecin, du pharmacien ou de l'orthopédiste orthésiste. Il peut être nécessaire de modeler les baleines pour les adapter à la forme du corps. En cas de problèmes ou de

gÃªne, demandez lâ€™avis de ces professionnels.

Conservez le produit Ã tempÃ©rature ambiante, de prÃ©fÃ©rence dans lâ€™emballage dâ€™origine.

Ce produit mÃ©dical est destinÃ© au traitement dâ€™un patient unique. Afin de garantir son efficacitÃ©, et pour des raisons dâ€™hygiÃ¨ne, il ne doit pas Ãªtre remis ensuite Ã dâ€™autres patients.

Consignes d'entretien

Ã Ã Ã * Laver Ã la main Ã 40Ã°C avec une lessive pour linge dÃ©licat

Ã Ã Ã * Ne pas utiliser dâ€™eau de javel ni dâ€™adoucissants

Ã Ã Ã * Essorer par pression

Ã Ã Ã * Faire sÃ©cher Ã lâ€™Ã©cart des sources de chaleur

Composition

Ã Ã Ã * Polyamide : 19 %

Ã Ã Ã * Ã©lasthanne : 24 %

Ã Ã Ã * Viscose : 18 %

Ã Ã Ã * Polyester : 29 %

Couleur

Noir

Taillage

Tour de taille Ã Ã Ã Ã Ã Ã Taille

Ã 52 - 62 cm Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã 1

Ã 63 - 74 cm Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã 2

Ã 75 - 89 cm Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã 3

Ã 90 - 105 cm Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã 4

Ã 106 - 120 cm Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã 5

Ã 121 - 140 cm Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã 6

[Information du vendeur](#)