

# Basilic Ortho Pedia

*Basilic Ortho Pedia*

## Cemen 18 x 250 cm

### Cemen

- Tissu élastique extra-fort
- Fermeture par auto agrippant
- Versions pour homme et pour femme

### Modes d'action

- Contention circulaire du thorax
- Contrôle de l'excursion de la paroi thoracique pendant la respiration

### Posologie

Usage thérapeutique, dans les indications mentionnées.

### Mise en place

- Posez la ceinture sur le corps, l'étiquette vers le haut et contre la peau.
  - Maintenez l'extrémité de gauche à plat avec la main gauche.
  - Fermez les attaches en fonction de la contention souhaitée.
- Suivez les instructions du médecin, du pharmacien ou de l'orthopédiste orthésiste. En cas de problèmes ou de gêne, demandez l'avis de ces professionnels.
- Conservez le produit à température ambiante, de préférence dans l'emballage d'origine.

Ce produit médical est destiné au traitement d'un patient unique. Afin de garantir son efficacité, et pour des raisons d'hygiène, il ne doit pas être remis ensuite à d'autres patients.

### Consignes d'entretien

- Laver à la main à 40°C avec une lessive pour linge délicat
- Ne pas utiliser d'eau de javel ni d'adoucissants
- Essorer par pression
- Faire sécher à l'écart des sources de chaleur

### Composition

- Coton : 80 %
- Élasthanne : 20 %

### Couleur

Blanc

### Taillage

- Tour de poitrine Taille
- 160 - 175 cm 1
- 176 - 190 cm 2

191 - 105 cm Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3  
106 - 120 cm Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4

Vous pouvez acheter ce produit sur notre boutique en ligne en cliquant [ici](#)  
[Information du vendeur](#)